

Conseils d'entretien

Nettoyage de la chambre une fois par semaine,
nettoyage du masque après chaque utilisation.



1 Retirez le masque, l'embout buccal (capuchon de protection ouvert) et nettoyez soigneusement toutes les pièces sous l'eau chaude du robinet avec du produit vaisselle.



2 Rincez avec soin toutes les pièces à l'eau claire.



3 Compte tenu du matériau en aluminium, VORTEX® peut être séchée avec un tissu propre sans en altérer les propriétés antistatiques.



VORTEX® est lavable au lave-vaisselle :

- placez les éléments à la verticale,
- sélectionnez un programme de lavage à 50°C minimum.

Ne nettoyez pas les différentes pièces avec une vaisselle très sale.

Désinfection de la chambre une fois par semaine



VORTEX® peut être désinfectée dans un stérilisateur pour biberon ou dans de l'eau bouillante pendant 5 min (veillez à ce qu'il y ait suffisamment d'eau pour recouvrir tous les éléments afin qu'ils ne touchent pas le fond du récipient).

Lire attentivement la notice avant toute utilisation

VORTEX® grandit avec la famille !



VORTEX® avec masque pour bébé Coccinelle*

0 à 2 ans
Code EAN: 4260020436920



VORTEX® avec masque pour enfant Grenouille

2 à 4 ans
Code EAN: 4260020436913

* Avec poignée

Retrouvez VORTEX®
sur notre site internet
parifrance.shop



La chambre d'inhalation (antistatique) VORTEX®, est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Elle est destinée à être utilisée avec les sprays de médicaments ou aérosols-doseurs pour traiter les affections des voies respiratoires. Seuls les médicaments homologués pour le traitement par inhalation peuvent être utilisés. En cas de douleurs persistantes ou d'aggravation de la santé, interrompez l'utilisation et contactez immédiatement votre médecin. Uniquement compatible avec le masque Coccinelle PARI (bébé jusqu'à 2 ans), masque Grenouille PARI (enfant de 2 à 4 ans). Chaque VORTEX® ne peut être utilisée à domicile que par un seul patient. Uniquement adaptée aux personnes qui respirent de manière autonome et qui sont conscientes. Veillez à toujours garder les éléments produit hors de portée des bébés et des jeunes enfants. Ce système est un assemblage de dispositifs médicaux. Reportez-vous à la notice de l'assemblage pour plus d'information. Demandez conseil auprès de votre médecin ou de votre pharmacien ou infirmier/infirmière. Fabricant : PARI GmbH, Moosstraße 3, 82319 Starnberg, GERMANY. Distributeur : PARI France SARL. Avril 2023.



Respirez librement

avec **PARI**



VORTEX®

*La chambre d'inhalation conçue pour faciliter
la prise du traitement des affections respiratoires*

www.pari.com

Aidez votre enfant à mieux respirer avec VORTEX®



Efficacité thérapeutique¹

- Chambre métallique antistatique, conçue pour une déposition pulmonaire optimale et performante.



Utilisation simple et intuitive

- Peu d'éléments à assembler.
- Poignée ergonomique pour une utilisation à une main sur la version 0-2 ans.



S'intègre facilement dans votre quotidien

- Entretien non contraignant (lavable au lave-vaisselle).
- Facile à transporter de part sa petite taille.
- Compatible avec la majorité des aérosols-doseurs.



VORTEX® grandit avec votre enfant

- Masques interchangeables et adaptés en fonction de l'âge.
- Possibilité d'inhaler sans masque via l'embout buccal intégré.

1. Chambres d'inhalation pour délivrance de fluticasone chez le nourrisson au banc d'essai, J. Pourchez et al, Revue des maladies respiratoires SPLF, vol 34, 2017.

Conseils de manipulation

Préparation de la séance d'inhalation avec VORTEX® et masque Grenouille pour les enfants âgés de 2 à 4 ans




- 1 Raccordez le masque à l'embout buccal de la chambre d'inhalation. Enlevez le bouchon de l'aérosol-doseur et agitez-le énergiquement.



- 2 Insérez l'embout buccal de l'aérosol-doseur dans la bague de raccordement bleue de VORTEX®.



- 3 Placez le masque sur le visage de votre enfant de façon à bien recouvrir la bouche et le nez. Appuyez sur l'aérosol-doseur pour déclencher une pulvérisation.

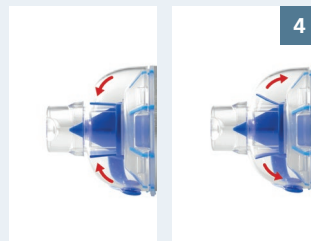

- 4 Votre enfant peut inspirer et expirer à travers le masque (2 à 4 cycles respiratoires). Les valves s'ouvrent alors; les phases d'expiration sont ainsi simples à reconnaître.

Si votre médecin a prescrit au moins deux pulvérisations, répétez les étapes 3 et 4.



La chambre d'inhalation VORTEX® et masque Coccinelle pour les bébés âgés de 0 à 2 ans est l'**unique chambre** dotée d'une **poignée d'aide à l'utilisation**.

La poignée permet de maintenir VORTEX® **d'une seule main** et de déclencher simultanément l'aérosol-doseur procurant ainsi plus de confort pendant la séance d'inhalation avec votre bébé.



Faites coulisser la poignée de sorte que sa prise puisse s'emboîter sur l'aérosol-doseur. La position de la poignée peut varier d'un système à l'autre.



Les enfants de moins de 18 mois doivent effectuer 4 à 6 cycles respiratoires.